



## **OBSAH**

Úvod

Specifikace výrobku

Komponenty produktu

Příprava

Konfigurace funkce

Provozní příručka

Opatření

Technické parametry

Skladování a údržba

## **INSTRUKCE**

### **Teorie a výsledky:**

Přístroj na masáž očního prostoru spojuje různé vibrační, masážní a tepelné funkce. K ovládní se využívá mikroprocesoru, který mimo funkcí masážních řídí intenzitu infračerveného záření, jehož pomocí se zvyšuje přísun kyslíku do oblasti očí. Zlepšuje se funkce ciliárního svalu a krevní oběh očí. Navozuje se relaxace očí a mozku, podporuje se i látková výměna a udržuje se zdravější zrak. Přístroje rovněž vybaven hudebním funkcí, takže si můžete vychutnat relaxační masáž s hudbou. Vaše oči si odpočinou při relaxaci, budete opět svěží a pohled na svět bude o poznání příjemnější.

### **Ureční a využití přístroje:**

Osoby trpící únavou zraku, pseudomyopií, pracující dlouhou dobu s počítačem, písemnostmi a nebo jiné práce zatěžující zrak.

Osoby pociťující napětí, nervozitu a bolest hlavy.

Osoby s nespavostí a únavovým syndromem - neurastenii.

### **Funkce přístroje:**

Tento produkt je multifunkční high-tech zařízení pro zdravotní péči o oči. Poskytuje relaxační masáže oblasti kolem očí a s pomocí ovládací techniky mikroprocesoru naladí oči a mozek do optimálního stavu. Nahrazuje a předčí klasickou ruční masáž očí.


Přístroj vytváří na špičkové technologické úrovni infračervené tepelné záření, aktivuje buňky kolem očí, stimuluje molekuly buněk pomocí vibrací, posiluje kombinace molekul a zlepšuje schopnost regenerace tkání, čímž dojde ke zlepšení imunologie proti chorobám a infekcím.

S úspěchem se uplatňuje koncept mírného tlaku vzduchu, tím se chrání a udržují zdravé oči.

Tlakem vzduchu se provádí celková masáž očního prostoru pod kontrolou mikroprocesoru. Takto nastavený a ověřený proces může snížit únavu očí, zlepšit funkci ciliárního svalu a zabránit zhoršení optické osy.

Přístroj je také vybaven vestavěným v trojrozměrném magnetickým polem. Stálý pohyb magnetického pole poskytuje účinnou masáž hlavních částí obličeje a svaly kolem očí, přičemž vznikají mikro-proudy v krevních cévách a aktivuje se krevní oběh kolem očí.

### Akupunkturní masážní body:

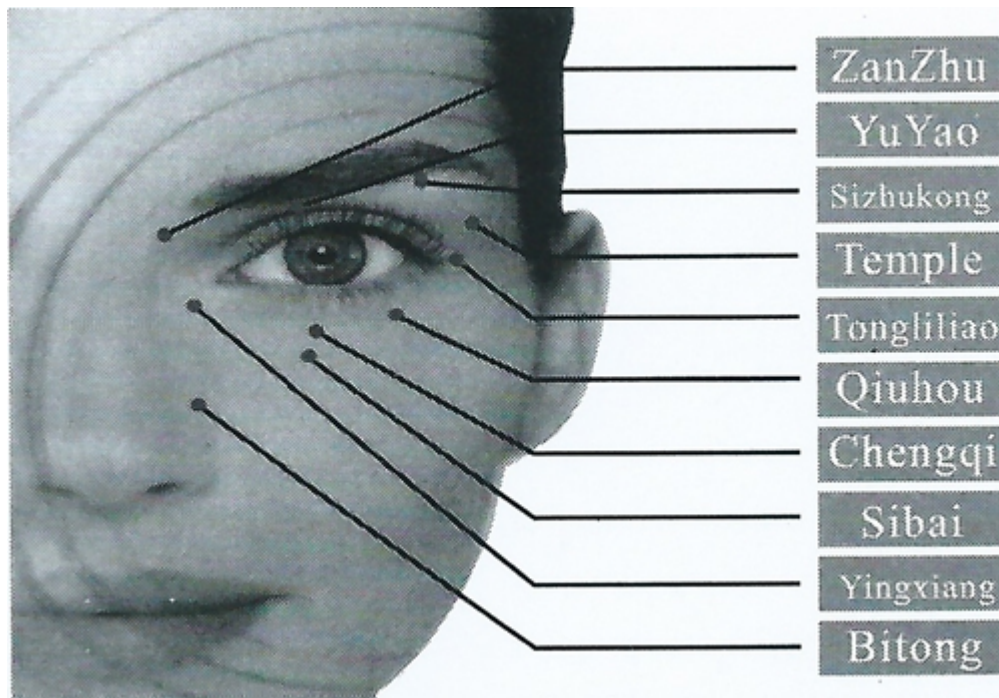

**ZanZhu** - bolesti hlavy, očí žluč, rozmazané vidění.

**YuYao** - keratitida - poruchy zraku, červené oči, oftalmoplegie - obličejové ochrnutí.

**Sizhukong** - hemicranias, jednostranná bolest hlavy.

**Temple** - odstranění překážek v kanálech, poruchy funkcí.

**Tongliliao** - chyba lomu, optická atrofie.

**Qiuhou** rozptýlení horkosti a odvodu tepla, navlhčení a jasné oči.

**Ihengqi** - akutní a chronická keratitida /zánětlivé onemocnění rohovky/, epifora /nadměrné slzení/, retinitis /zánět ze sítnice v oku/.

**Sibai** - ochrnutí obličeje, trifacial neuralgie /trojklanný nerv/.

**Yingxiang** - ochrnutí obličeje.

**Bitong** - refrakční chyby, nasitis /ucpávání nosu/.

### Uvedení do provozu:

Instalace baterie:

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně ručního regulátoru.
2. Vložte 4AA baterie v souladu s označením.

3. Zavřete kryt baterie.


### Pozor:

Zkontrolujte anodu a katodu baterie a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány; zavřete kryt baterie.

### Připojení přes adaptér:

1. Adaptér je součástí dodávky, výstupní napětí z adaptéru je DC 6V.
2. Pro připojení do zásuvky 220V použijte přiloženou redukci
3. DC výstup z adaptéru je válcová zástrčka, kterou zapojíte do ručního regulátoru na oči.
4. Ruční regulátor obsahuje zásuvku pro připojení sluchátek. Hudba ze sluchátek zpříjemní relaxační proceduru.

### Rozmístění ovládacích prvků:

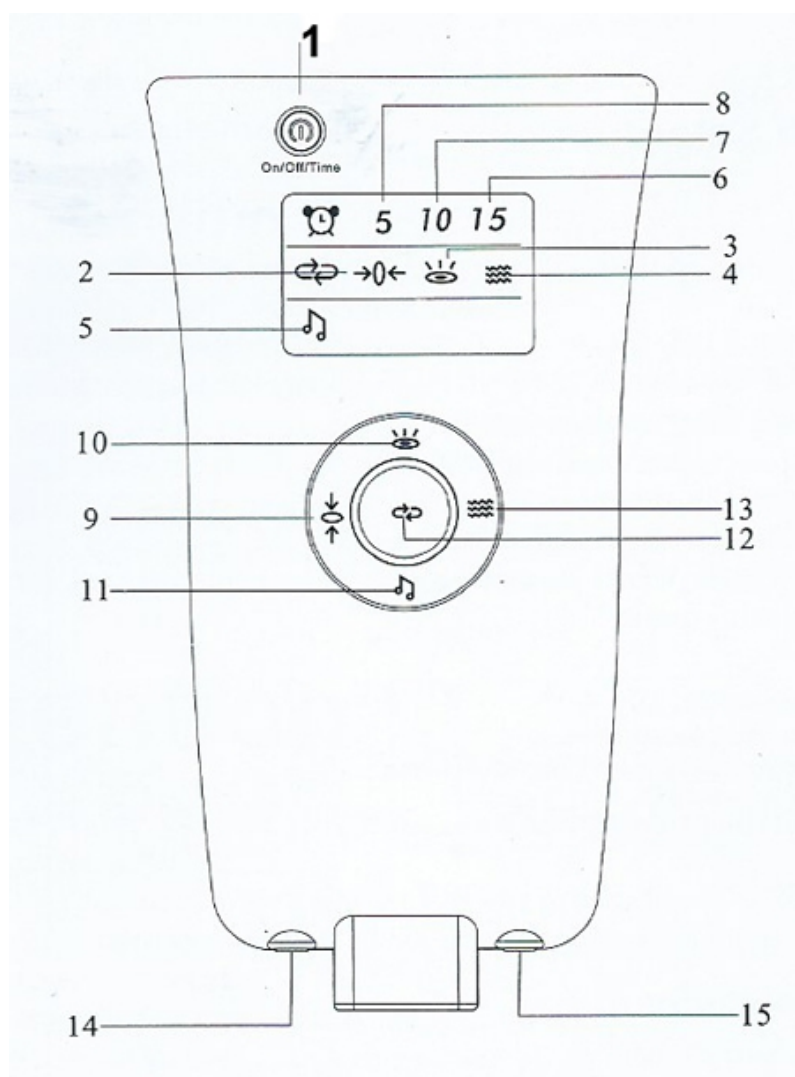

1. ON / OFF / TIME
2. Indikátor tlaku vzduchu
3. Indikátor infračerveného tepla
4. Indikátor vibrací
5. Indikátor hudby
6. Indikátor, časovač 15 minut
7. Indikátor, časovač 10 minut
8. Indikátor, časovač 15minut
9. Tlačítko selekční tlak
10. Topení výběr tlačítko
11. Tlačítko pro výběr hudby
12. Tlačítko pro výběr funkce
13. Tlačítko pro výběr vibrací
14. Připojení DC adaptéru
15. Připojení sluchátek

### **On / Off - výběr:**

### **TLAK, TEPLO, ČAS HUDBY, VIBRACE.**

Stisknutím tlačítka **On Off / Time**, přístroj začne pracovat. Indikátor tlaku vzduchu, ukazatel infračerveného tepla, indikátor hudby a časovač 15 minut jsou implicitně nastavené. Automatický režim masáže.

### **Možnosti nastavení:**

Automatický režim masáže lze změnit následovně:

Můžete si vybrat ze tří automatických masážních programů.

1. úroveň tlaku - 2. úroveň tlaku - 3.úroveň tlaku. Nastavíte takovou úroveň, která je pro Vás v dané době nejpříjemnější.

### **Provozní příručka**

Tlačítko On/Off/Time, při první stisknutí zapnete přístroj další stisknutí aktivuje časování 15min / 10min / 5min. Delším podržením tlačítka přístroj vypnete.

### **Teplota**

Výběr mezi vyšší a nižší, v režimu 15min, 10min, 5min.

### **Hudba**

Relaxační hudba

Mozkové vlny.

Zvuky přírody.

Krátkým stiskem tlačítka se symbolem not, vyberete další stopu.

Dlouhým stiskem tlačítka hudbu zastavíte.

## **Vibrační masáž**

Bliká 2 krát

Bliká 10 krát

### **Bezpečnost:**

- Prosím, přečtěte si tuto uživatelskou příručku pečlivě pro správné a bezpečné používání tohoto přístroje.
- Přístroj neslouží jako náhrada za operaci očí nebo na odstranění očního zranění a závažných očních chorob, atd.
- Pro osoby mající sklon k mozkové mrtvici, hypertenzi a hypotenzi není tento přístroj vhodný.
- Přístroj rovněž není vhodný pro samostatné používání osob s fyzickým nebo mentálním či duševním postižením.
- K čištění nepoužívejte ředidla, benzín, chlorid, alkalické čisticí prostředky nebo kyselinu. Je-li nutné provést očistu přístroje, otřete jej bavlnou namočenou v lihu. Neomývejte pod vodou.
- Po odstranění poruch očí, redukci očních vrásek, přestaňte přístroj na čas používat.
- Přístroj je složitý celek, proto se nepokoušejte jej rozdělat nebo opravovat.

### **Pozor:**

- Zařízení uveďte do provozu teprve tehdy, když je máte nasazeno na očích. Při samostatném spuštění by mohlo dojít k poškození vzduchového vaku v důsledku přetlaku.
- Při masáži nepoužívejte kontaktní čočky.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepoužívejte tento produkt při řízení nebo při chůzi.
- Děti do 8 by měly být během používání pod dozorem dospělé osoby.
- Nepoužívejte masáž v podmínkách vysoké teploty, jako v koupelně.
- Během skladování, vyjměte baterie, pokud je máte nainstalovány, aby nedošlo k úniku kapaliny baterie.
- Prosím, mějte oči zavřené při masáži očí. Po masáži, jemně prsty masírujte oblast očí, aby se odstranily červené skvrny způsobené masážní jednotkou.
- Pro děti je doporučeno používat přístroj nejdéle 20 minut.
- Přístroj je zdravotní pomůcka, není určen pro komerční.

- Chraňte před nárazem nebo se ponořením do vody.

### **Řešení problémů:**

Pokud zjistíte problém, při použití přístroje, opakujte několikrát předepsaný postup. V případě, že přístroj nefunguje normálně, prosím, vypněte napájení a obraťte se na prodejní místo. Nerozebírejte ani opravujte zařízení sami.

### **Technické parametry:**

Ideální teplota prostředí: 5 ° C-40 ° C Relativní vlhkost: 80%

Atmosférický tlak: 860hpa ~ 1060hpa

Intenzita magnetického pole: 50MT-250mT

Skladování: 30 ° C - 42 ° C

Příkon: DC6V 1A

Příkon: 6W, váha 485g

### **Údržba:**

Údržba spočívá v kontrole napájení a správného zapojení přístroje a případném čištění otřením bavlnou namočenou v lihu. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.

Ukládejte na bezpečné místo. Nepokládejte těžké předměty na zařízení.

Přijmout opatření, aby se zabránilo vlhkosti a znečištění.

Obraťte se prodejní místo, pokud existuje chyba. Přístroj nerozebírejte sami.

### **Přeprava a skladování:**

Ideální teplota prostředí: 5 ° C-40 ° C Relativní vlhkost: <80% Skladujte ve větraném prostoru větrání a mimo dosah přímého slunečního záření a korozivního prostředí.

Atmosférický tlak: 860hpa-1060hpa

### **Doprava:**

Výrobek je, nárazuvzdorný a lze přepravovat letecky, železnicí, po cestě nebo lodí. Při přepravě je nutné se vyhnout tvrdým nárazům, kontaktu s deštěm a sněhem.

V případě, že doba skladování je delší jak 6 měsíců, prosím zkontrolujte přístroj v provozu asi půl hodiny. Skladujte v suchém prostředí.